

# Ghid de masurare

## Masuratoarea

1



Asezati catelul/pisica in pozitie patrupodala, naturala ca in imaginea alaturata si masurati distanta de la coada la piciorul din fata


## Masuratoarea 2



**Asezati catelul/pisica in pozitie patrupodala,naturala ca in imaginea alaturata si masurati distanta de la piept la coada**

## Masuratoarea


3

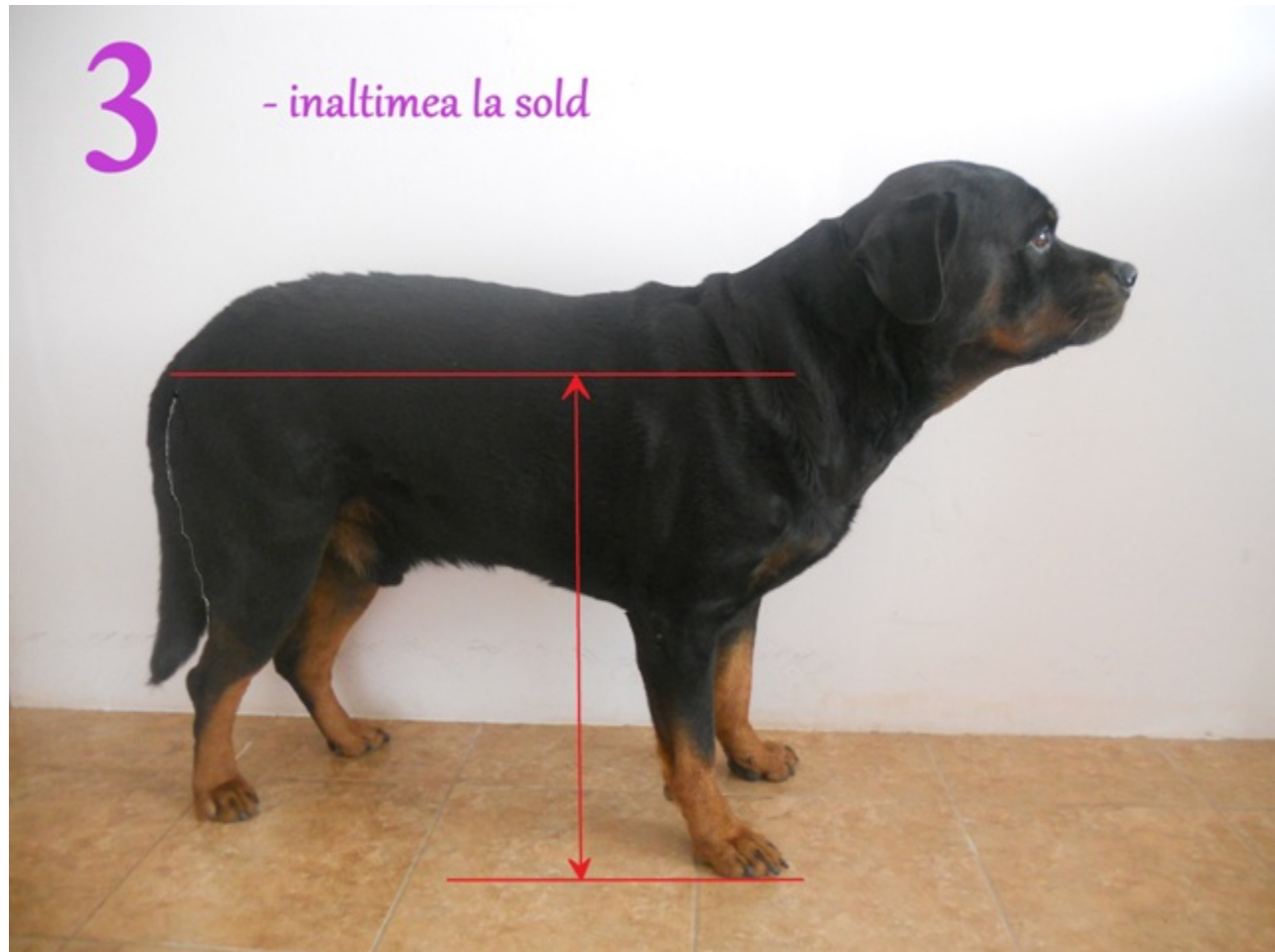

**Asezati catelul/pisica in pozitie patrupodala,naturala ca in imaginea alaturata si masurati inaltimea de la podea la sold**


## Masuratoarea

4

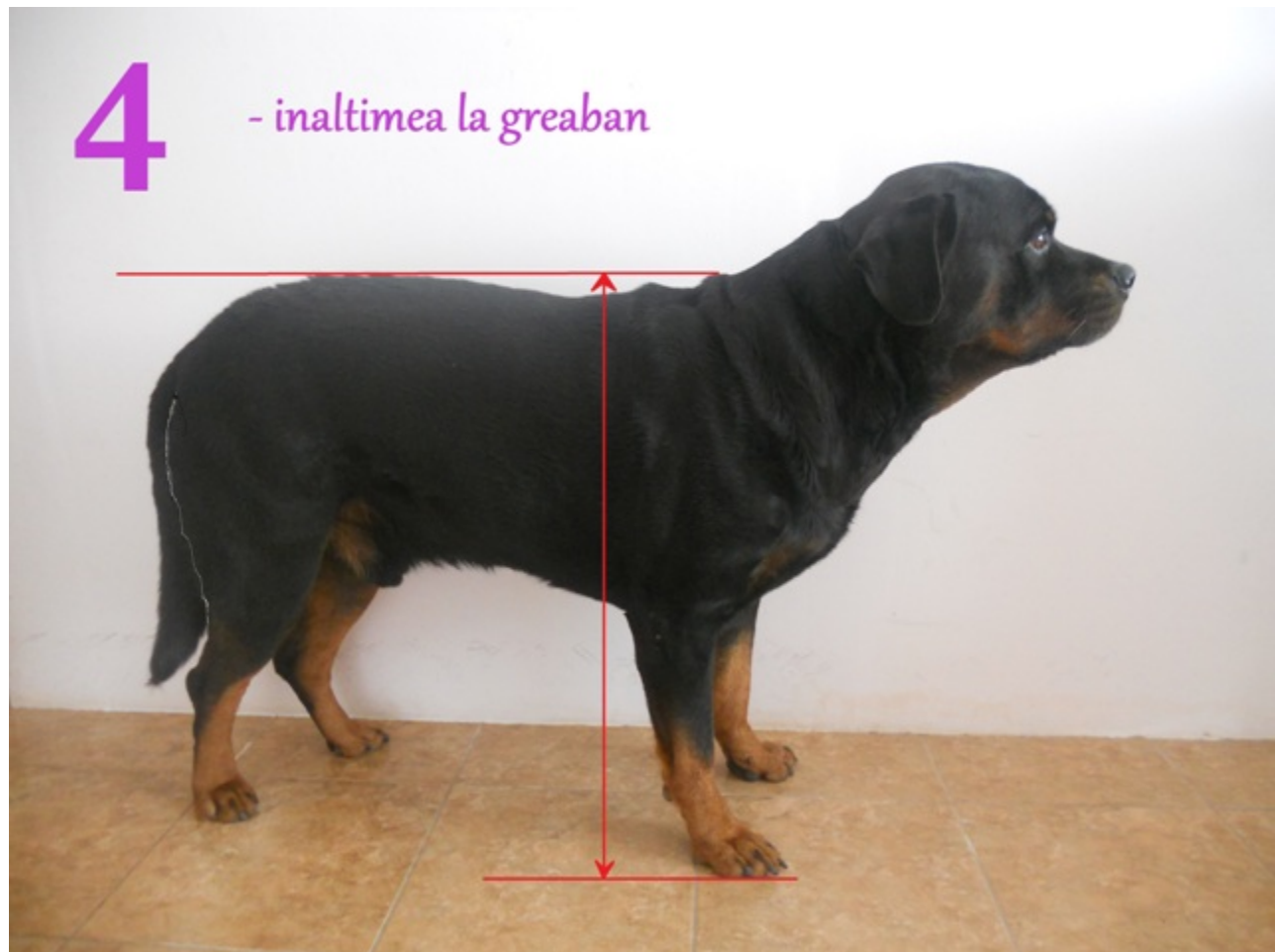

**Asezati catelul/pisica in pozitie patrupodala,naturala ca in imaginea alaturata si masurati inaltimea de la podea la greaban.**

## Masuratoarea 5

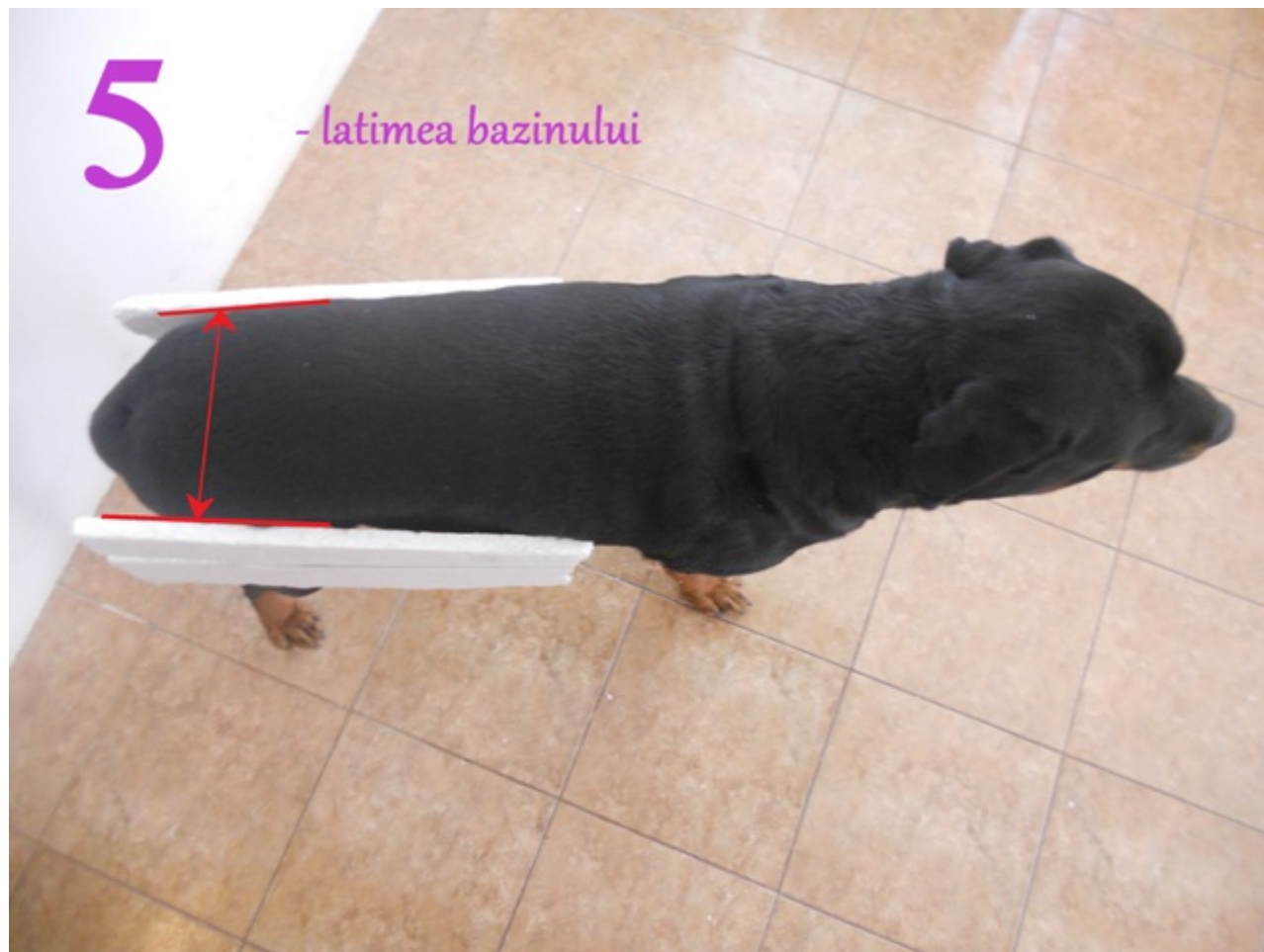

**Asezati catelul/pisica in pozitie patrupodala,naturala ca in imaginea alaturata si masurati latimea bazinului**



## Masuratoarea

6



**Asezati catelul/pisica in pozitie patrupodala,naturala ca in imaginea alaturata si masurati latimea pieptului**

## Masuratoarea

7



**Asezati catelul/pisica in pozitie patrupodala,naturala ca in imaginea alaturata si masurati distanta de la mijlocul pulpei la coada**

## Masuratoarea 8



**Cantarii greutatea corporala a pacientului**